


## Kort bruksanvisning



**1** Ta bort folieskyddet från kyvetten. Vidrör ej den blanka nedre delen av kyvetten.



**2** Håll Sample Collector nästan i ett horisontalt läge under ytan av bloddroppen och fyll kapillärdelen av Sample Collector.

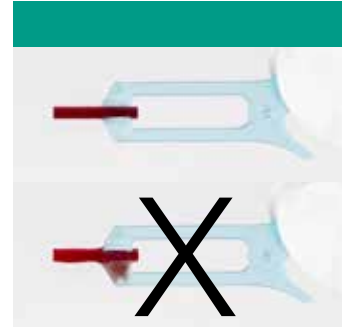

**Obs!** Kontrollera att kapillärdelen är helt fylld. **Torka inte av Sample Collectorn!** Om det finns överskott av prov på Sample Collector, kasta bort Sample Collector.



**3** Sätt ner Sample Collector i kuvetten inom 2 minuter. Sätt på reagenskorken ordentligt. Tryck inte ner den turkosa inre delen av korken. Efter att provet satts till bufferten skall analys köras inom 2 timmar.



**4** Välj mätning på QuikRead go instrumentets display. Placera kyvetten i mätbrunnen. Streckkoden ska vara vänd mot dig.



**5** När analysen är klar visas resultatet på displayen och kyvetten kommer automatiskt upp ur mätbrunnen.

*För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.*



## Reagensförvaring



### Reagenskit

Förvaring av öppnat kit i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum.



### Sample Collector ask

Förvaring av öppnat kit i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum.



### Oöppnade kyvetter

Förvaring i 2–8°C: hållbar i 6 månader.  
Förvaring i 18–25°C: hållbar i 3 månader.



### Reagenskorkar

Oöppnat rör i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum på kitet.  
Öppnat rör i 2–25°C: hållbart i 6 månader.



### Öppnad kyvett

Provet är stabilt i bufferten i 2 timmar. Utför testet inom 2 timmar efter att kyvetten öppnats. Låt bufferten bli rumstempererad innan testet utförs.



### easy CRP-kontroller (se tabell nedan)

Oöppnad flaska i 2–8°C: hållbar till utgångsdatum.

Öppnad flaska i 2–8°C: hållbar upp till två månader.



Orion Diagnostica Oy  
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83  
02101 Espoo  
www.oriondiagnostica.fi, www.quikread.com

8100-01SE for FI, 04/2019

Produkt	Art.nr.	Art.nr. MediqSuomi
QuikRead go easy CRP, 50 tester » med 10 µl Sample Collector	153287	1703003
Ultrasensitiv CRP-kontroll	132698	68257
QuikRead go wrCRP-kontroll	153038	1702752
QuikRead go wrCRP-kontroll hög	153039	1702753
QuikRead go CRP-kontroll låg	153765	1703060
QuikRead go CRP-kontroll	153764	1703061
QuikRead go CRP-kontroll hög	153763	1703062
QuikRead go Instrument	135867	-

Läs mer på [www.quikread.com](http://www.quikread.com)