

Pikakäyttöohje



1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Varo läikyttämästä puskuria. Tarkista, että nestepinta on kahden kyvetissä olevan viivan välissä. Älä koske kyvetin alaosaan.



2 Laita mäntä kapillaarin sinisellä merkityyn päähän. Ota näytettä (20 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.



3 Lisää näyte (20 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.



4 Sulje kyvetti huolellisesti reagenssikorkilla. Älä paina korkin sinistä sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä "Mittaus".



6 Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin. Mittauksen etenemistä voi seurata näytöltä.



7 Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle, ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. QuikRead go CRP+Hb -testin Hb-tulos näkyy CRP-tuloksen alapuolella.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Reagenssien säilytys



Reagenssipakkaus

Avaamaton pakkaus
2–8°C:n lämpötilassa: säilyy
pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka



Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen

Säilytys 2–8°C:
6 kuukautta

Säilytys 18–25°C:
3 kuukautta



Reagenssikorkit avaamattomassa tai avatussa putkilossa

Avaamaton putkilo 2–8°C:
pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka

Avaamisen jälkeen 18–25°C:
1 kuukausi

7,5 h/vrk (ja muun ajan
vrk:sta säilytys 2–8°C): 3
kuukautta



Avattu kyvetti

Testi tulee tehdä kahden
(2) tunnin kuluessa
kyvetin avaamisesta.
Anna puskurin lämmetä
huoneenlämpöiseksi ennen
testin suorittamista. Näyte
säilyy puskuriliuoksessa
kahden (2) tunnin ajan.



CRP-kontrollit

(katso taulukko alla)

Avaamattomat pulloet
2–8°C: viimeiseen käyttö-
päivämäärään saakka

Avattu pullo 2–8°C:
enintään 2 kuukautta

Hb-kontrolli

(katso taulukko alla)

Avaamaton pullo 2–8°C:
viimeiseen käyttöpäivä-
määrään saakka

Avattu pullo 2–8°C:
enintään 1 kuukausi

Tuote	Tuotenro	Tilausno Mediq Suomi Oystä
QuikRead go CRP, 50 testiä » sisältää kapillaarit ja männät	133891	1700552
QuikRead go CRP, 50 testiä	135172	1003422
QuikRead go CRP+Hb, 50 testiä » sisältää kapillaarit ja männät	140066	1550522
QuikRead CRP kontrolli 1 ml	68296	68296
QuikRead go CRP kontrolli High 1 ml	137071	1701174
QuikRead go Hb kontrolli 1 ml	141154	1550278
QuikRead kapillaarit 20 µl, 50 kpl	67962	67962
QuikRead männät, 50 kpl	67966	67966
QuikRead go -laite	135867	–



Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo
Puh. 010 426 2709, Faksi 010 426 2794,
www.oriondiagnostica.fi, www.quikread.com

8064-01FI, 03/2016

Lisätietoja: www.oriondiagnostica.fi

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510
Lisätietoja tuotteista: puh. 010 426 2709
e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi